

Návod na použití Oxygenal 6

Lahev pro umístění roztoku Oxygenalu odšroubujte z dezinfekčního systému zubní soupravy.

Poznámka

Přetlak, který je v lahvi je při odšroubování postupně odpuštěn.

VAROVÁNÍ

Nesprávné čištění lahve může mít za následek její poškození!.

- ▶ Nepoužívejte pro ředění vodu teplejší než 50°C!
- ▶ Nemyjte nádobu v běžné myčce na nádobí.
- ▶ Odstraňte ochrannou hadici z dávkovače.
- ▶ Protáhněte hadici přes dávkovací otvor lahve.
- ▶ Pevně našroubujte dávkovací uzávěr na lahev přípravku Oxygenal.



Pootočte víčkem dávkovacího uzávěru do polohy označující náplň 1.5 litru
Víčko zaklapněte do patřičné polohy.



Umístěte lahev Oxygenalu na rovné místo.

- ▶ Stlačujte lahev. Prostředek začne vyplňovat dávkovací uzávěr.
- Pokud prostředek přesáhne nastavenou hladinu, odtéká zpět do dolů do lahve – tím je jednoduše zaručeno vždy správné odměření nastavené dávky.



Držte lahev Oxygenalu v co nejvíce vertikální poloze a naplňte lahev.



Poznámka

Pokud je ve v dávkovacím uzávěru viditelný sediment, nejedná se o znečištění produktu – jedná se usazeninu, která vzniká při kondenzaci déle stojící vody.

Tento sediment se rozpustí během několika dalších dávkování.